

# Ciotola per miscelazione cemento osseo

## Manuale d'istruzione

### Descrizione Generale

4MIX è un dispositivo per la miscelazione e l'applicazione di cemento ortopedico.

4MIX è stato studiato con un design facile da utilizzare e capace di miscelare cementi con diverse viscosità.

La confezione include :

- 1 Ciotola per miscelazione
- 1 Filtro
- 1 Tubo per il vuoto
- 1 Spatola
- 1 Manuale d'istruzione




### Istruzioni per l'uso

1. Aprire la confezione e rimuovere tutti i prodotti.
2. Collegare il tubo dalla parte del filtro al coperchio della ciotola **B** e l'altra estremità al vuoto. **E**
3. Versare cemento osseo (polvere e liquido) nella ciotola. **C**
4. Chiudere ermeticamente il coperchio della ciotola ed assicurarsi che il vuoto funzioni.



5. Avviare la miscelazione e seguire i tempi di miscelazione in base alle specifiche del cemento. **A**
6. Arrestare la pompa di aspirazione e disconnettere il tubo dal coperchio della ciotola. Aprire il coperchio.
7. Utilizzare la spatola per raccogliere il cemento osseo. **D**

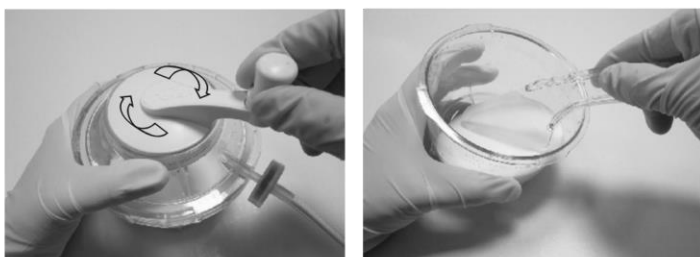

### Precauzione

La legge internazionale limita la vendita a personale medico.

### Avvertimento

- La sterilità è garantita solo se la confezione è chiusa e non danneggiata.
- Assicurarsi che il dispositivo sia smaltito in modo sicuro ed in conformità con tutte le direttive nazionali ed internazionali di smaltimento rifiuti.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
Solo monouso ! **NON Risterilizzare !**



CE 0197



**STERILE EO**  
Non risterilizzare